

sagemax<sup>®</sup>



Upute za uporabu

---

# WAX Disc

za CAD/CAM tehnologiju  
i tehnologiju prešanja

[sagemax.com](http://sagemax.com)

## Opis

Sagemax WAX disk namijenjen je za CAD/CAM izradu voštanih nadomjestaka. Primjene obuhvaćaju dentalne voštane nadomjestke izrađene CAD/CAM tehnologijom za tehnologiju prešanja i lijevanja.

## Svojstva

- › Kemijski sastav: sintetički vosak
- › Boja: plava
- › Talište: 100 - 120 °C
- › Gustoća: 0,92 g/cm<sup>3</sup>
- › Topivost u vodi: netopljivo

## Indikacije

- › Izrada dentalnih voštanih nadomjestaka izrađenih CAD/CAM tehnologijom za tehnologiju prešanja i lijevanja.

## Kontraindikacije

- › Materijal nije odobren za izravnu uporabu u pacijentovim ustima.

## Napomene o oblikovanju

Za oblikovanje se pridržavajte uputa za uporabu proizvođača za odgovarajuću leguru i keramike za prešanje.

## Obrada CAD/CAM tehnologijom

Sagemax WAX disk može se obraditi dentalnim CAD/CAM sustavima za glodanje (slijedite upute proizvođača).

Pri obradi materijala koristite se samo alatima za glodanje preporučenim za ovaj sustav za glodanje. Radna temperatura okoline ne smije prekoračiti 35 °C.

## Obrada nakon glodanja

### Završna obrada

Nakon glodanja odvojite obrađeni predmet od diska odgovarajućom križnom frezom od volframova karbida. Završna obrada ili prilagodbe oblika moraju se vršiti križnim frezama od volframova karbida. Materijal se može poboljšati uporabom konvencionalnog voska za modeliranje.

## Pričvršćivanje odljevnih kanala

Pravila za odabir i pravilno postavljanje odljevniha kanala ovise o korištenoj leguri. Detaljnije informacije o legurama možete pronaći u odgovarajućim uputama proizvođača.

## Ulaganje

Obložite unutrašnjost prstena za lijevanje keramičkom oblogom. Zamiješajte uložni materijal i uložite ga pod vakuumom. Pridržavajte se uputa proizvođača o materijalu za ulaganje i leguri koju je potrebno upotrijebiti.

## Skladištenje

- › Skladištite na 10 - 32 °C.
- › Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti.
- › Čuvajte izvan dohvata djece!

## Odlaganje

Sagemax WAX disk se sastoji od čistog sintetičkog voska. Ostaci se mogu upotrijebiti za druge uobičajene primjene voska. Vosak se može odložiti s kućanskim otpadom.



Proizvodnja

**Sagemax Bioceramics, Inc.**  
34210 9th Ave. South, Suite 118  
Federal Way, WA 98003, USA  
T +1-253-214-0389  
E info@sagemax.com

Predstavnik za EZ

**AB Ardent**  
Generatorgatan 8  
19560 Arlandastad, Sweden  
T +46 8594 412 57  
E info@sagemax.com

### **RX only**

Samo za stomatološku primjenu

Ovaj je materijal namijenjen isključivo stomatološkoj uporabi i mora se obraditi u skladu s uputama. Proizvođač nije odgovoran za štete koje nastanu kao rezultat zlorabe ili nepridržavanja uputa. Korisnik je sam odgovoran za ispitivanje prikladnosti i uporabljivosti proizvoda za sve namjene koje nisu izričito navedene u uputama za uporabu. Isto vrijedi i kada se materijali miješaju s proizvodima drugih tvrtki ili se upotrebljavaju s njima.

sagemax.com

sagemax®