

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Upute za uporabu

PMMA Disc

za CAD/CAM tehnologiju

Opis

Sagemax PMMA disk namijenjen je za izradu privremenih nadomjestaka CAD/CAM tehnologijom.

Mehanička svojstva

- | | |
|---|--------------------------|
| – otpornost na savijanje | ≥50 MPa |
| – sorpcija vode u skladu s normom ISO 10477 | ≤40 µg /mm ³ |
| – topljivost | ≤7,5 µg /mm ³ |

Sastav

- polimetil-metakrilat (PMMA)
- pigmenti boje

Indikacije

- Sagemax PMMA disk namijenjen je za izradu privremenih zubnih proteza.
- Primjene obuhvaćaju: Prednja i stražnja krunica i mostovi s najviše 2 međučlana za maksimalno razdoblje nošenja od 6 mjeseci..

Kontraindikacije

- Nedovoljna redukcija strukture zuba.
- Struktura zuba koja nije dovoljna za pravilno prijanjanje i raspodjelu sile.
- Nedovoljna oralna higijena.
- Nedovoljno interproksimalnog prostora za dovoljan broj spojeva u mostovima.
- Poznate alergije. Poznata nepodnošljivost sastojaka proizvoda.
- Trajno cementiranje.

Parametri oblikovanja

- Za krunice minimalna debljina stijenke ne smije biti manja od 1 mm.
- Pri oblikovanju mostova s jednim povezanim međučlanom poprečni presjek spojnog mjesta između krunice i jedinice međučlana ne smije biti manji od 12 mm².
- Pri oblikovanju mostova s rasponom od najviše dva povezana međučlana poprečni presjek spojnog mjesta između krunice i međučlana ne smije biti manji od 12 mm².

Završna obrada

Za prilagođavanje i odvajanje okvira koristite se križnim diskom od volframova karbida ili diskom za razdvajanje koji je prikladan za akrile.

Poliranje

Nadomjesci se mogu polirati unaprijed odgovarajućim silikonskim polirerom i četkicom od kozje dlake. Standardna akrilna sredstva za poliranje također su prikladna za intraoralnu uporabu. Izbjegavajte stvaranje prekomjerne topline. Pažljivo poliranje neophodno je radi postizanja savršenih rezultata kako bi se izbjegli akumulacija plaka i drugi povezani negativni učinci na boju.

Čišćenje

Obradeni nadomjestak stavite u ultrazvučnu jedinicu na otprilike 1 minutu. Udio alkalne otopine za čišćenje treba iznositi maksimalno 10 %, a maksimalna temperatura 40 °C. Izbjegavajte čišćenje parom i pod tlačnim opterećenjem.

Postavljanje

Nakon pripreme zuba upotrijebite kartice boja radi usporedbe boje i potvrde boje nadomjeska. Postavite privremeni nadomjestak pomoću privremenog adhezijskog cementa. Uklonite višak cementa. Prikladni su svi privremeni cementni/adhezijski materijali. Ako se nadomjestak cementira adhezijski, moraju se upotrijebiti cementni materijali bez eugenola. Slijedite odgovarajuće upute za uporabu proizvođača cementa.

Upozorenja opasnosti

Nemojte udisati prašinu nastalu prilikom brušenja tijekom obrade Sagemax PMMA diska jer može iritirati oči, kožu i dišne putove.

Stoga, uvijek provjerite radi li ekstraktor stroja za glodanje neometano.

Savjeti

Ako postoji sumnja na netoleranciju proizvoda, upotrebljavajte ga samo nakon testa na alergije.

Dezinficirajte oglodane dijelove prije nego što ih umetnete u usta pacijenta. Ove upute za uporabu temelje se na trenutačnom znanju o proizvodu. Korisnik je u potpunosti odgovoran za pravilnu uporabu proizvoda. Proizvođač nije odgovoran za nijedne nezadovoljavajuće rezultate jer ne upravlja postupkom obrade. Zubni tehničar obavještava stomatologa o zahvatima koje je potrebno izvršiti prije umetanja nadomjeska u usta pacijenta osiguravajući time da je stomatolog dobio sve informacije sadržane u ovim uputama za uporabu.

Skladištenje

- Zaštitite materijal od izravne sunčeve svjetlosti i skladištite ga na suhom mjestu (od –18 do 33 °C).
- Pregledajte upute za skladištenje i rok valjanosti na vanjskoj ambalaži.
- Izbjegavajte izlaganje sunčevoj svjetlosti.
- Čuvajte izvan dohvata djece.

sagemax



Proizvedeno za:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

Predstavnik za EZ:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

C € 0123

RX only

Samo za dentalnu uporabu.

Datum: 2019-06-13/Rev. 0

HR

Materijal je namijenjen isključivo za dentalnu primjenu. Obrada se mora provoditi isključivo prema uputama za uporabu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete koje su rezultat nepridržavanja uputa ili navedenog područja primjene. Korisnik je odgovoran za ispitivanje prikladnosti i korištenja proizvoda za svaku svrhu koja nije izričito navedena u uputama. Opisi i podaci nisu jamstvo svojstava i nisu obvezujući.

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.