

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Upute za uporabu

WAX Disc

za CAD/CAM tehnologiju i
tehnologiju prešanja

Opis

Sagemax WAX disk namijenjen je za CAD/CAM izradu voštanih nadomjestaka. Primjene obuhvaćaju dentalne voštane nadomjestke izrađene CAD/CAM tehnologijom za tehnologiju prešanja i lijevanja.

Svojstva

- | | |
|--------------------|------------------------|
| – Kemijski sastav: | sintetički vosak |
| – Boja: | plava |
| – Talište: | 100 – 120 °C |
| – Gustoća: | 0,92 g/cm ³ |
| – Topivost u vodi: | netopljivo |

Indikacije

Izrada dentalnih voštanih nadomjestaka izrađenih CAD/CAM tehnologijom za tehnologiju prešanja i lijevanja.

Kontraindikacije

Materijal nije odobren za izravnu uporabu u pacijentovim ustima.

Napomene o oblikovanju

Za oblikovanje se pridržavajte uputa za uporabu proizvođača za odgovarajuću leguru i keramike za prešanje.

Obrada CAD/CAM tehnologijom

Sagemax WAX disk može se obraditi dentalnim CAD/CAM sustavima za glodanje (slijedite upute proizvođača).

Pri obradi materijala koristite se samo alatima za glodanje preporučenim za ovaj sustav za glodanje. Radna temperatura okoline ne smije prekoračiti 35 °C.

Obrada nakon glodanja

Završna obrada

Nakon glodanja odvojite obrađeni predmet od diska odgovarajućom križnom frezom od volframova karbida. Završna obrada ili prilagodbe oblika moraju se vršiti križnim frezama od volframova karbida. Materijal se može poboljšati uporabom konvencionalnog voska za modeliranje.

Pričvrščivanje odljevnih kanala

Pravila za odabir i pravilno postavljanje odljevnih kanala ovise o korištenoj leguri. Detaljnije informacije o legurama možete pronaći u odgovarajućim uputama proizvođača.

Ulaganje

Obložite unutrašnjost prstena za lijevanje keramičkom oblogom. Zamiješajte uložni materijal i uložite ga pod vakuumom. Pridržavajte se uputa proizvođača o materijalu za ulaganje i leguri koju je potrebno upotrijebiti.

Skladištenje

- Skladištite na 10 – 32 °C.
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti.
- Čuvajte izvan dohvata djece!

Odlaganje

Sagemax WAX disk se sastoji od čistog sintetičkog voska. Ostaci se mogu upotrijebiti za druge uobičajene primjene voska. Vosak se može odložiti s kućanskim otpadom.

Ovaj je materijal namijenjen isključivo za stomatološku primjenu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete koje su rezultat nepridržavanja uputa ili navedenog područja primjene. Korisnik je odgovoran za ispitivanje prikladnosti i uporabljivosti materijala za svaku svrhu koja nije izričito navedena u uputama. Ove se odredbe odnose i na miješanje ili upotrebu materijala u kombinaciji s proizvodima drugih proizvođača.

sagemax



Proizvodnja:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E C	R E P
-----	-------

Predstavnik za EZ:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

RX only

Samo za dentalnu uporabu.

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Datum: 2019-07-08/Rev. 0

HR