

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Упатство за употреба

WAX Disc

за технологијата CAD/CAM & Press

Опис

Sagetaх WAX Disc е направен за изработка на CAD/CAM од восочни реставрации. Примената опфаќа дентални восочни реставрации изработени со технологијата CAD/CAM за технологијата со притисок и леење.

Својства

- | | |
|---|------------------------|
| – Хемиски состав: | Синтетички восок |
| – Боја: | Сина |
| – Точка на образување капка при топење: | 100 – 120 °C |
| – Густина: | 0,92 g/cm ³ |
| – Растворливост во вода: | Нерастворливо |

Индикации

Производство на дентални восочни реставрации изработени со технологијата CAD/CAM за технологијата со притисок и леење.

Контраиндикации

Не е одобрен за употреба директно во устата на пациентот

Напомени за дизајнот

За дизајнот, следете ги упатствата на производителот за соодветната легура и керамика за обработка со притисок.

Обработка со CAD/CAM

Блоковите Sagetaх WAX Disc може да се обработуваат со помош на денталните системи за стружење CAD/CAM (следете ги упатствата на производителот).

При обработка на материјалот, користете само препорачани алатки за стружење за овој систем за стружење. Амбиенталната работна температура не треба да надминува 35 °C.

Обработка по стружење

Финиширање

По стружењето, одделете го обработениот предмет од дискот со помош на соодветна волфрам-карбидна алатка со напречен пресек. Финиширањето или приспособувањата на формата мора да се изведува со волфрам-карбидни алатки со напречен пресек. Материјалот може да се засили со помош на конвенционален восок за моделирање.

Прикачување на каналот за леење

Правилата за избор и правилно позиционирање на каналите за леење зависат од легурата што се користи. Детални информации за легурите може да се најдат во соодветните упатства на производителот.

Обложување калапи

Обложете ја внатрешноста на прстенот за леење со керамичка подлога. Измешајте го материјалот за обложување калапи и нанесете го под вакуум. Следете ги упатствата на производителот за материјалот за обложување калапи и легурата што ќе се користат.

Чување

- Да се чува на температура од 10 до 32 °C.
- Да се заштити од директна сончева светлина.
- Да се чува подалеку од дофат на деца!

Фрлање во отпад

Sagetaх WAX Disc се состои од чист синтетички восок. Остатоците може да се користат за други приспособени примени на восокот. Восокот може да се фрли како обичен домашен отпад.

Материјалот е развиен исклучиво за употреба во стоматологијата. Нема да се прифаќа одговорност за штета настаната од неследење на Упатството или на пропишаната сфера на користење. Корисникот е одговорен за тестирање на материјалот за неговата соодветност и употреба за која било цел што не е изречно наведена во Упатството. Овие прописи важат и ако материјалот се меша или користи заедно со производи од други производители.

sagemax



Производител:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

ЕС-претставник:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

Rx only

**Само за употреба во
стоматологијата.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Датум: 2019-07-08/Рев.0

МК